

Rappel de bandelettes pour lecteurs de glycémie mylife™ Pura® par mesure de précaution

L'ESSENTIEL : Les lots concernés présentent un risque d'ouverture accidentelle des flacons lors du transport entre le lieu de stockage et les pharmacies et entraînant une possible altération de la qualité des bandelettes.

Les bandelettes ayant subi cette ouverture ont ainsi pu perdre leur qualité et seraient sources de lectures de glycémie anormalement élevées : ce qui peut générer des réactions et adaptations de traitements non appropriées avec comme conséquence des hypoglycémies. (Les lots incriminés ont été distribués dans les officines entre octobre 2010 et décembre 2011. Depuis, des actions préventives ont été prises en scellant les flacons avec un film protecteur.)

CE QU'IL CONVIENT DE FAIRE : Si vous utilisez le lecteur de glycémie de la marque mylife™ Pura® et que vous êtes en possession de ces boîtes :

- Vérifier le code lot des boîtes concernées (liste à télécharger [ici](#) ou en bas de page, pdf)
- Ne pas utiliser les bandelettes des boîtes non scellées
- Rapporter les boîtes concernées chez votre pharmacien qui procédera à l'échange des flacons par des flacons scellés.

En cas de doute, vous pouvez appeler le N° Vert **0805 09 40 10** mis en service par le fabricant YPSOMED